

Talventil för ventilerade patienter

Primedi-Phon Vent®



Steripolar

Taking care further

Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande **Taking care further** i vårt dagliga arbete.

Talventil för ventilerade patienter

Primedi-Phon Vent® är en orange talventil som gör det möjligt för patienter som behöver en trakealkanyl att tala normalt och samtidigt få konstgjord andning.

Primedi-Phon® Vent består av ett plasthölje, ett lock med ventilfunktion och en roterande anslutning (15mm) på patientsidan för anslutning till en ventilator.

Ventilmembranet är fixerat i mitten av locket och stänger ventilen i dess grundposition. Ventilen öppnas vid inandning för lungventilation. Utandningens tryck hjälper till att stänga ventilen. Luften undgår bredvid trakealkanylen genom svalg och struphuvud till näs- och munhålan. Passering av stämbanderna möjliggör fonation.

Egenskaper

- Talventil för patienter i ventilator
- 15 / 22 mm konnektor (i patientändan)
- Vridbar 15 mm konnektor för slang (i ventilatorändan)
- Positiv effekt för gasutbyte
- Minskar atelektaser
- Latex- och DEHP-fri
- Material: Silikon och ABS
- Användningstid: Om hanterad och rengjord korrekt, och om alla försiktighetsåtgärder beaktas och följs, är användningstiden minst två månader.



Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning
200320	PrimediPhon® Vent talventil	1

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se