


Positioneringslösningar


PinkProtect™ och The Pink Lat Pack™

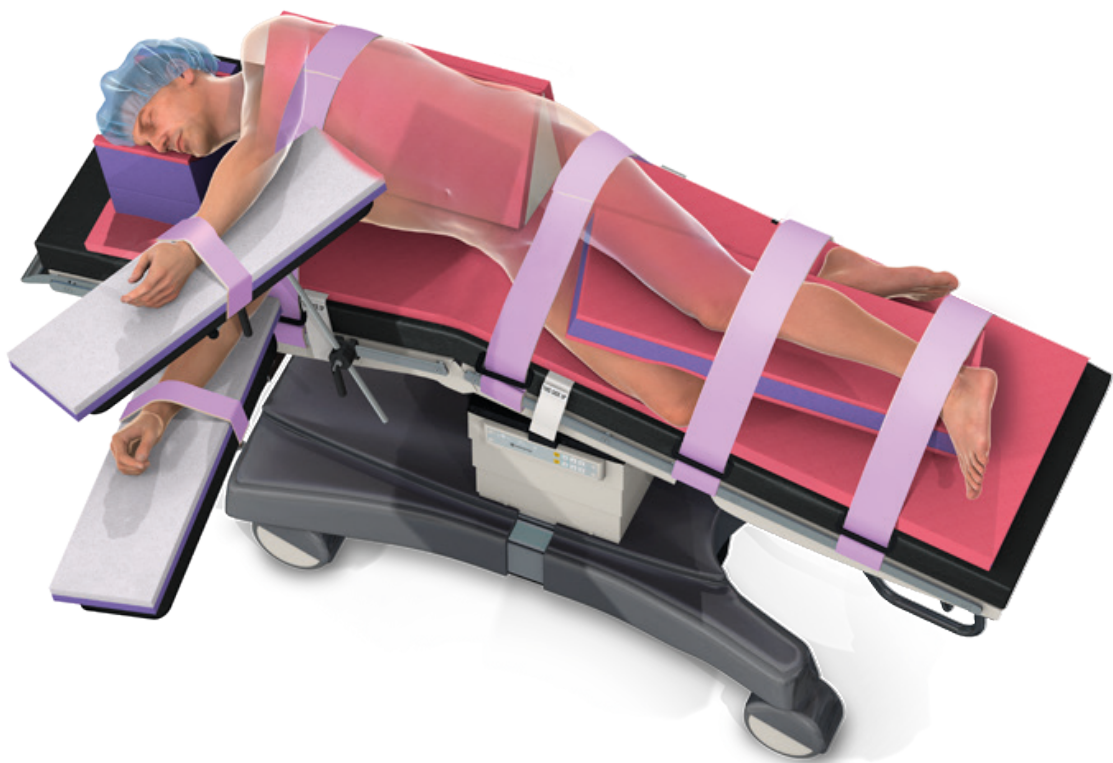


Steripolar
Taking care further

Effektiva och säkra lösningar
för positionering i sidoläge
med PinkProtect™ och The
Pink Lat Pack™

Positioneringslösningar i bukläge och vid högt BMI

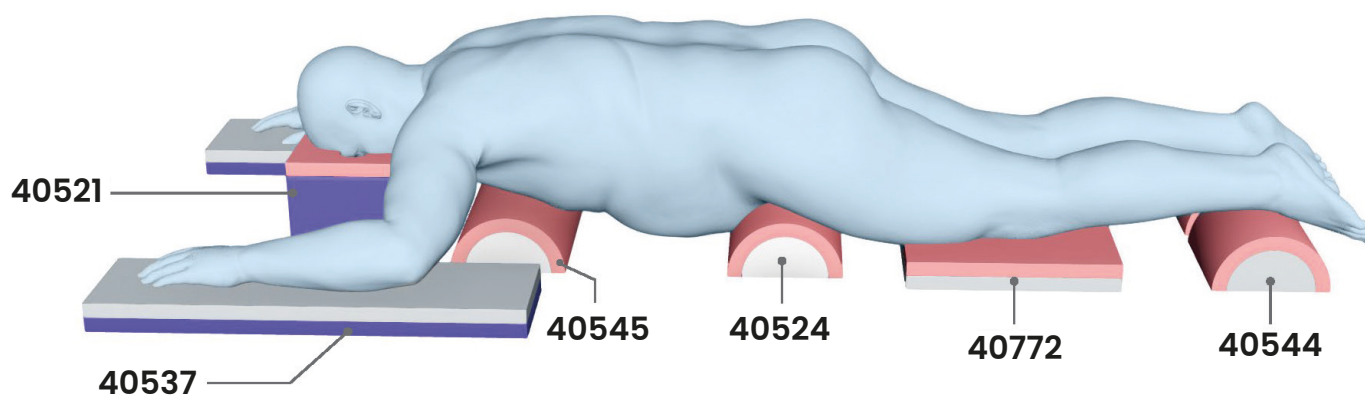


Positionera horisontellt över bröstet och höftbenskammen för att avlasta trycket på bröstet och trycket på buken hos överviktiga patienter.

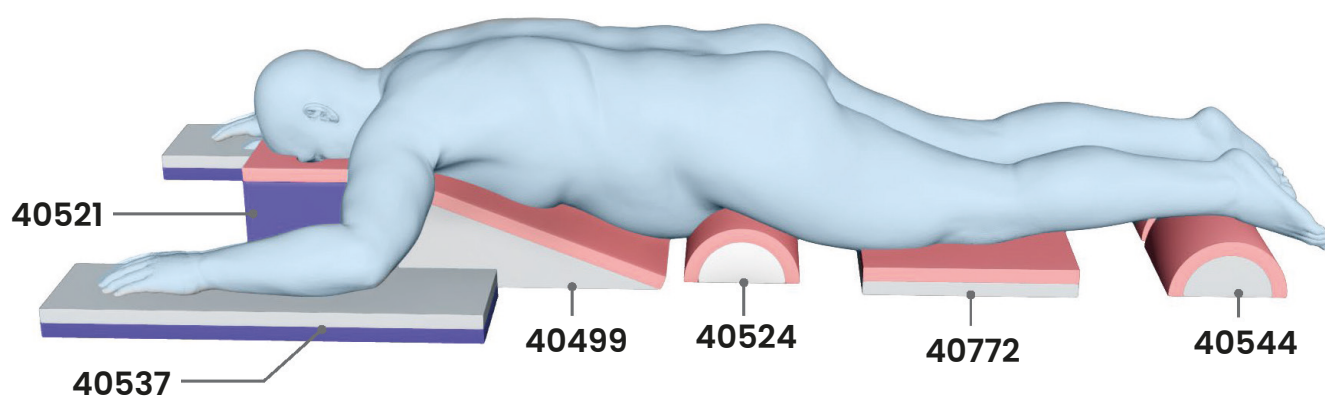


Tillåt kilen att smalna av mot buken för att avlasta trycket, positionera den stora stödbågen horisontellt över höftbenskammen för att stödja och skydda huden.

Positioneringslösningar i bukläge och vid högt BMI

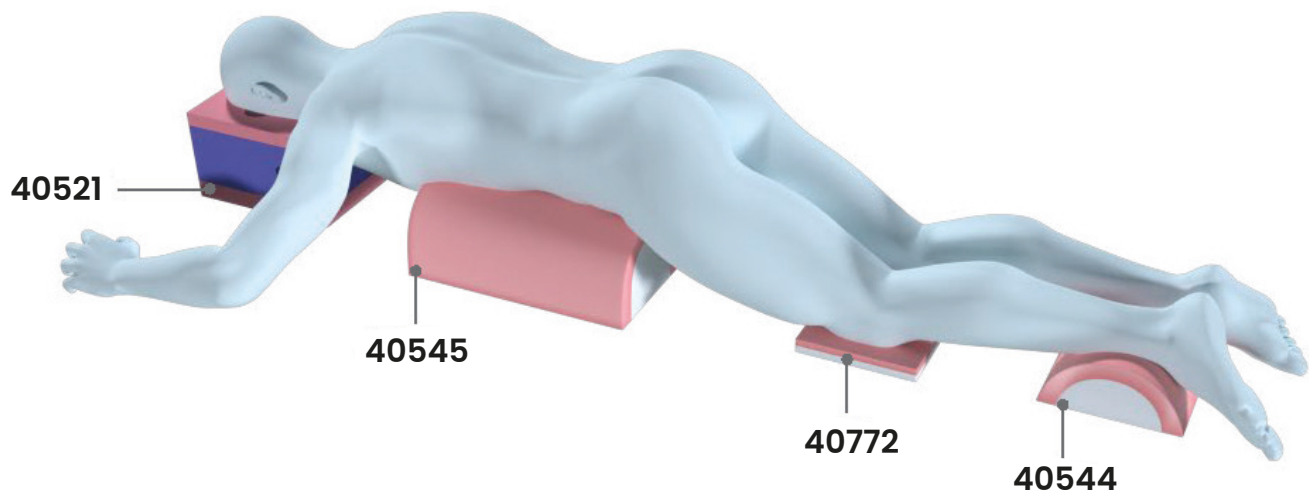


Positionera vertikalt från höftbenskammen framåt mot bröstet (särskilt användbart för manliga patienter och vid procedurer som avlägsnande av pilonidalcystor).

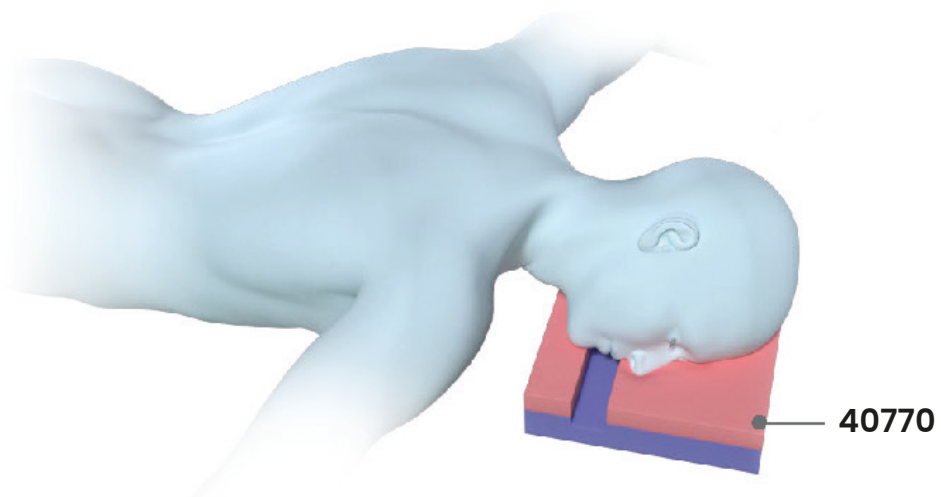


Använd positioneringskuddar för sidoläge för långvarig buklägespositionering.

Positioneringslösningar för ryggläge och stöd i sidoläge

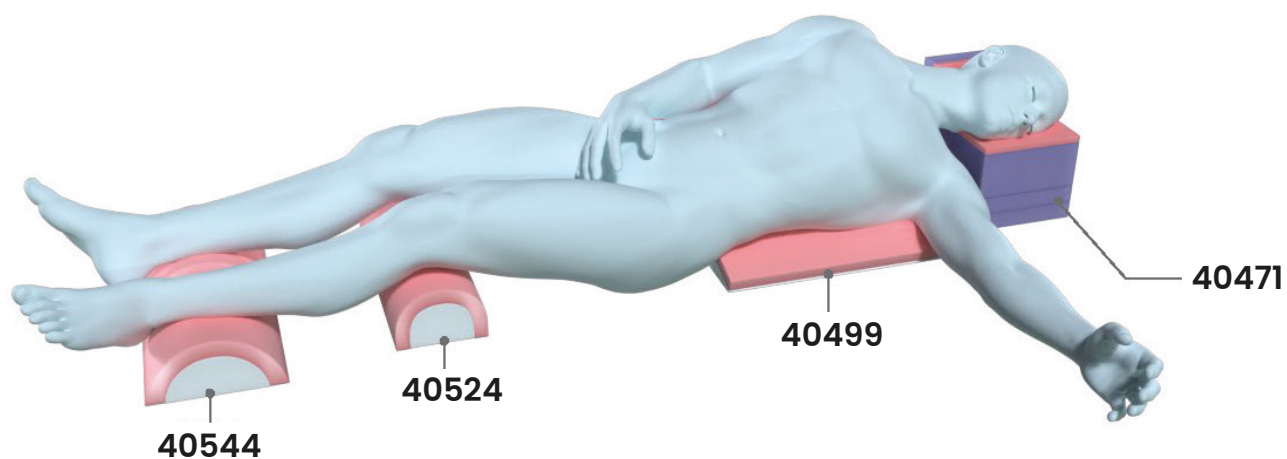


För att underlätta andningen hos överviktiga patienter, positionera en horisontellt placerad kil som höjer upp ena sidan av patienten (positioneringskudde för sidoläge visas i bild).

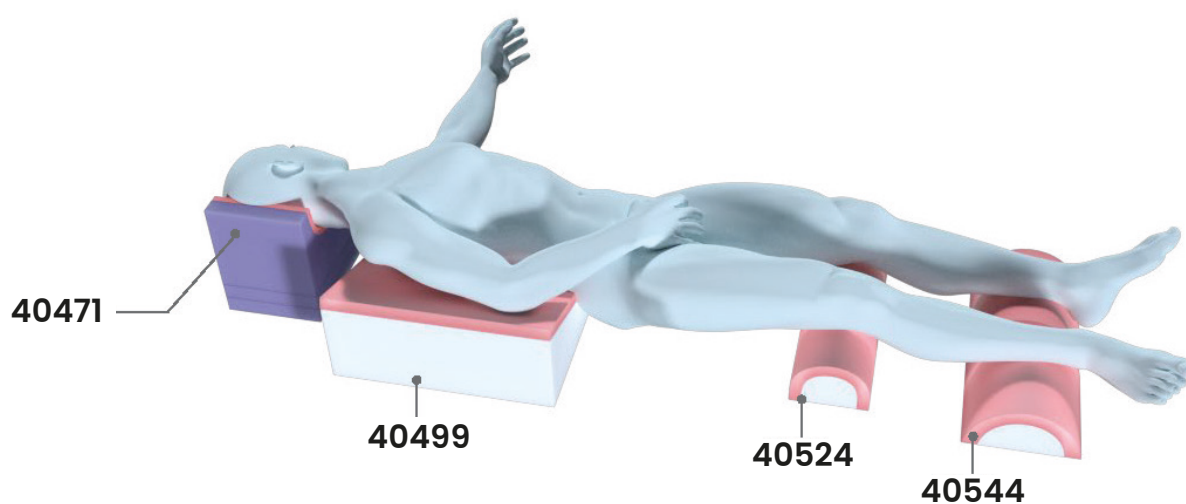


(Omvänd vinkel)

Positioneringslösningar för ryggläge och stöd i sidoläge

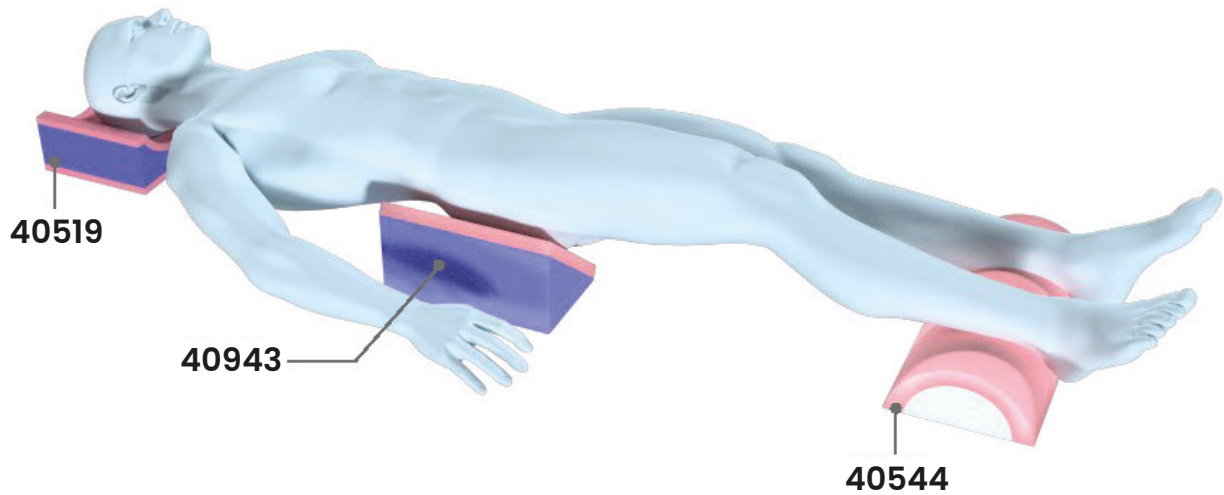


Använd en liten kil för att höja upp höften för tryckavlastning eller vid höftoperationer.

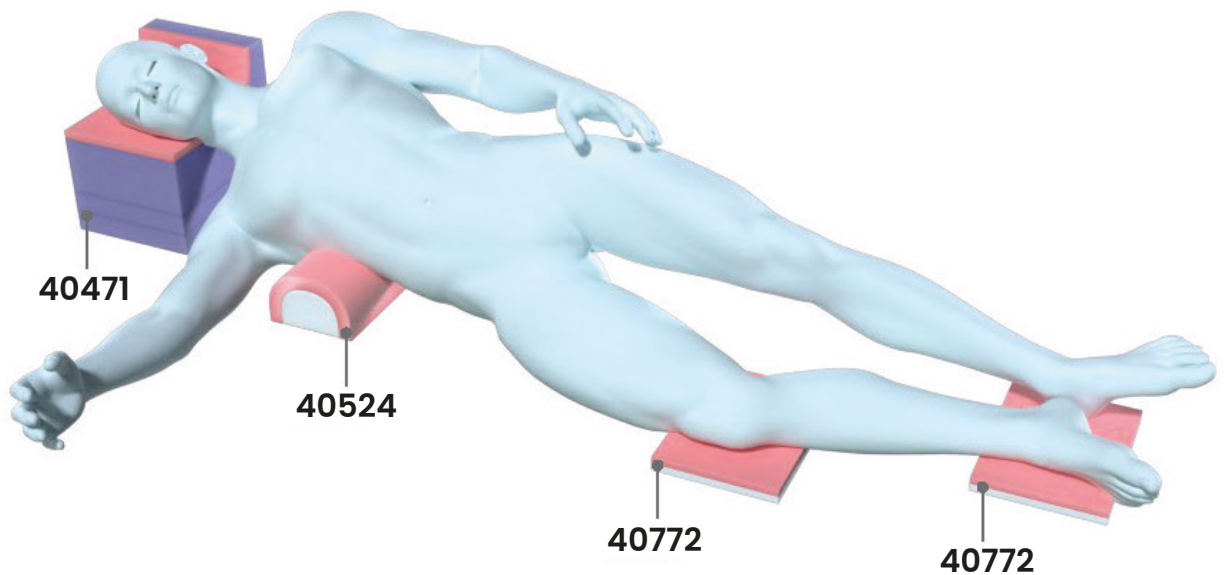


Alternativt positioneringsförslag för sidoläge.

Positioneringslösningar för rygggläge

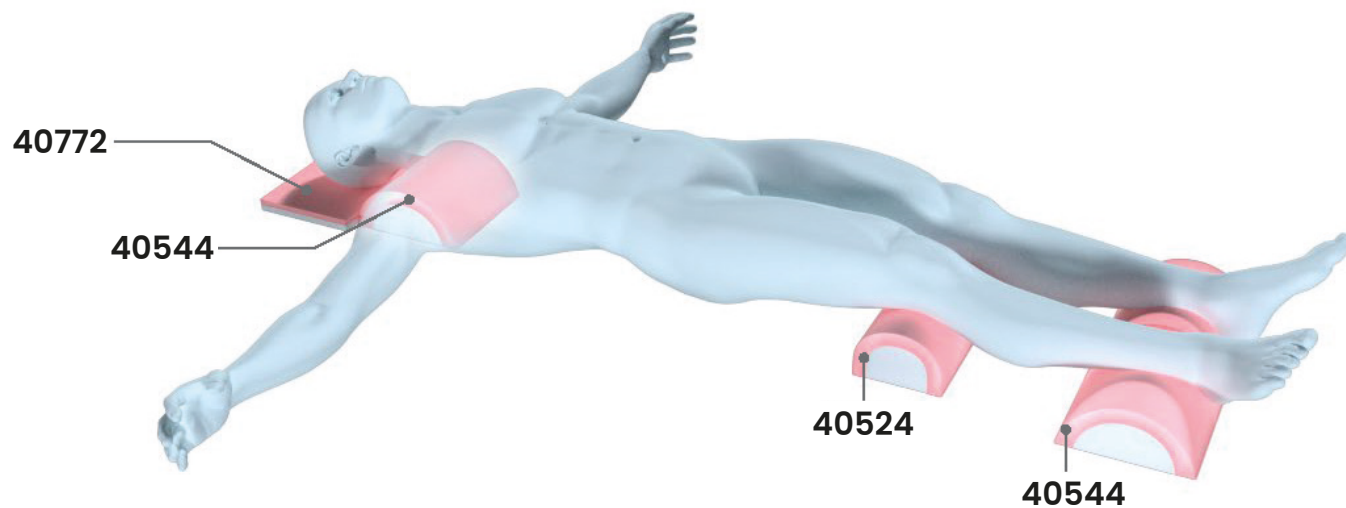


Positionera små stödbågar under nacken för hyperextension.

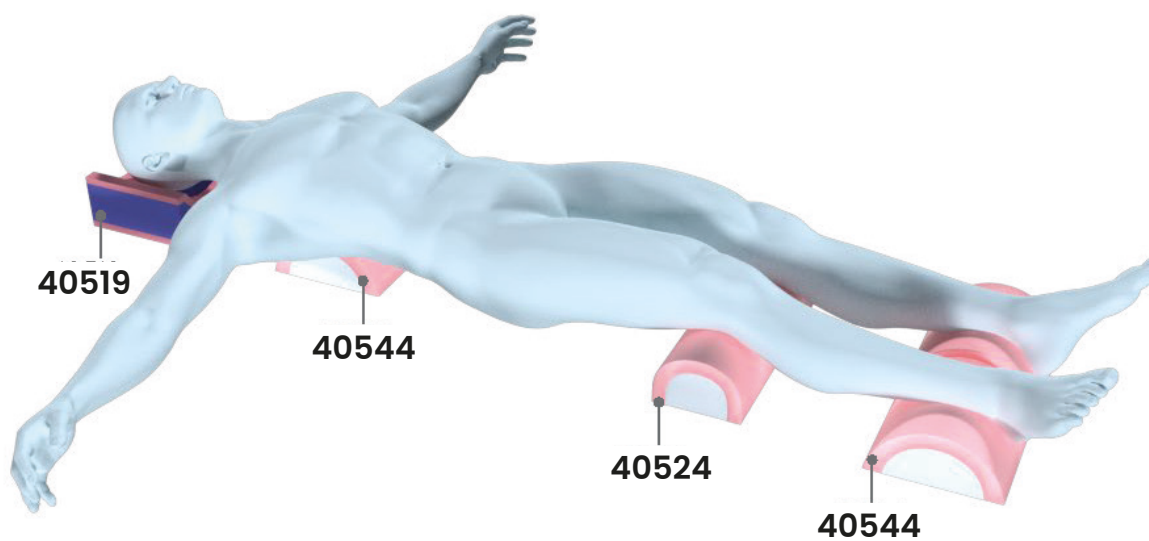


Positioneringsförslag med små och stora stödbågar.


Positioneringslösningar för rygggläge

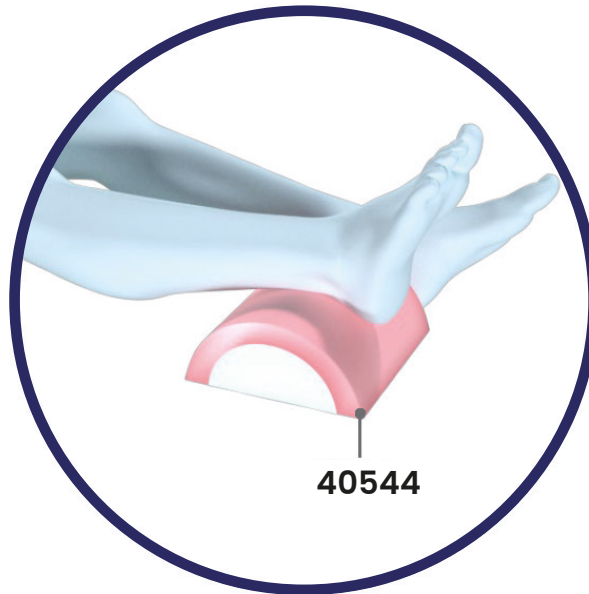

Positionera stödbågar under hälarna för att avlasta hälar.

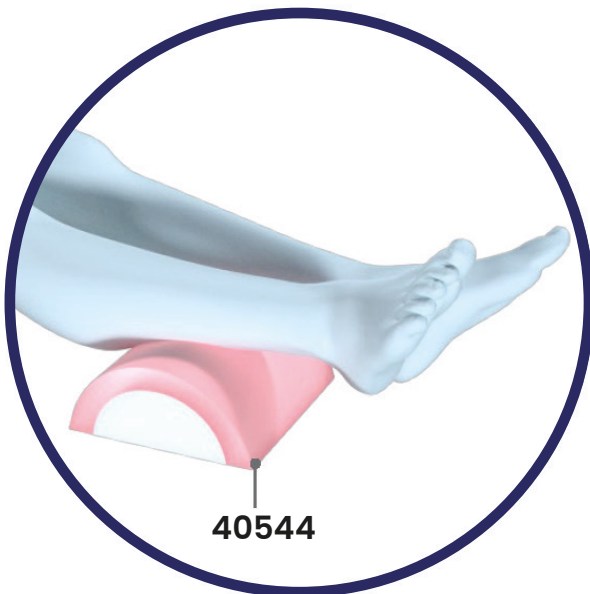


Positionera stödbågar under vaderna för att avlasta hälar.

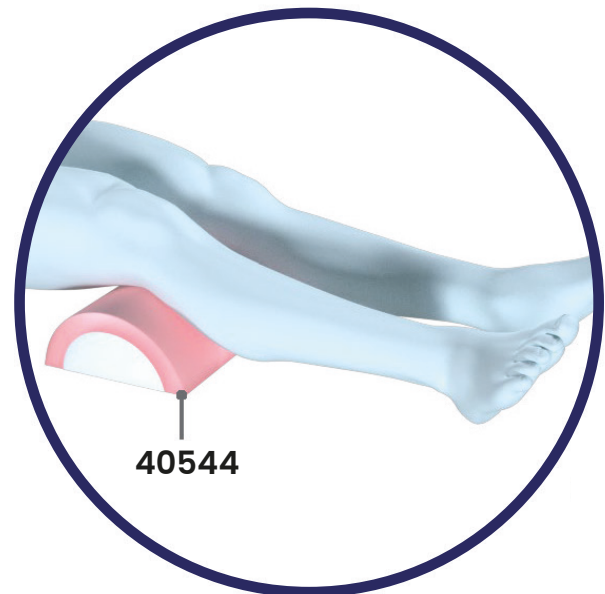

Positionera bågar under knäna för att uppnå en vinkel på 5-10 grader.


LPK10005 – Standard Pink Lat Pack

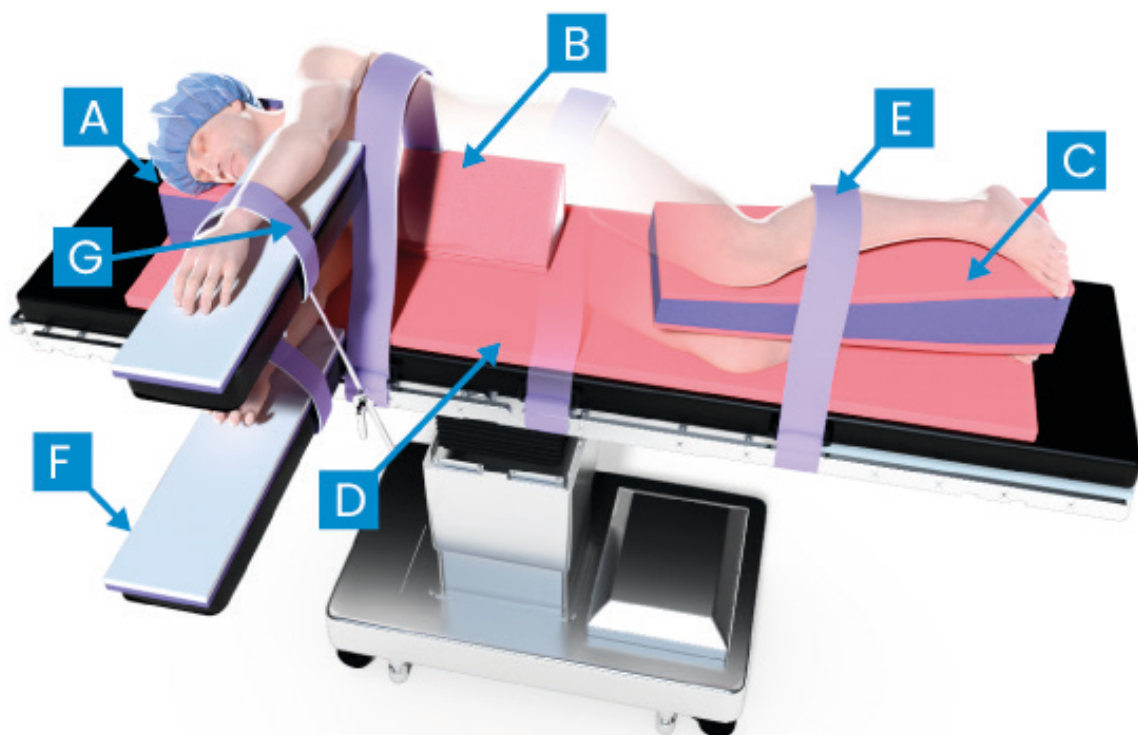


Standard Pink Lat Pack innehåller:

- A** Justerbar positioneringskudde för sidoläge (1)
- B** Kilkudde flervinklad (1)
- C** Avsmalnad kil för benpositionering (1)
- D** Pink Pad Extended (1)
- E** Kroppsremmar (4)
- F** Armstödsdyna DermaProx™ (1 par)
- G** Armrem för armbord (1 par)
- H** Draglakan (1)

Antal / förpackning: 3

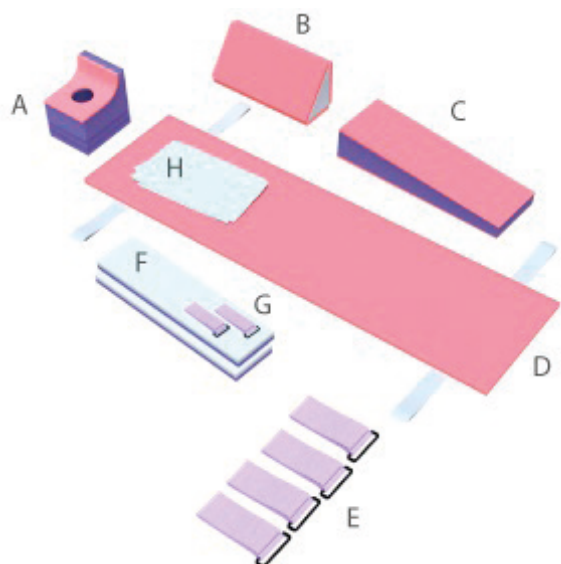


PK10022 – Savatta Pink Lat Pack

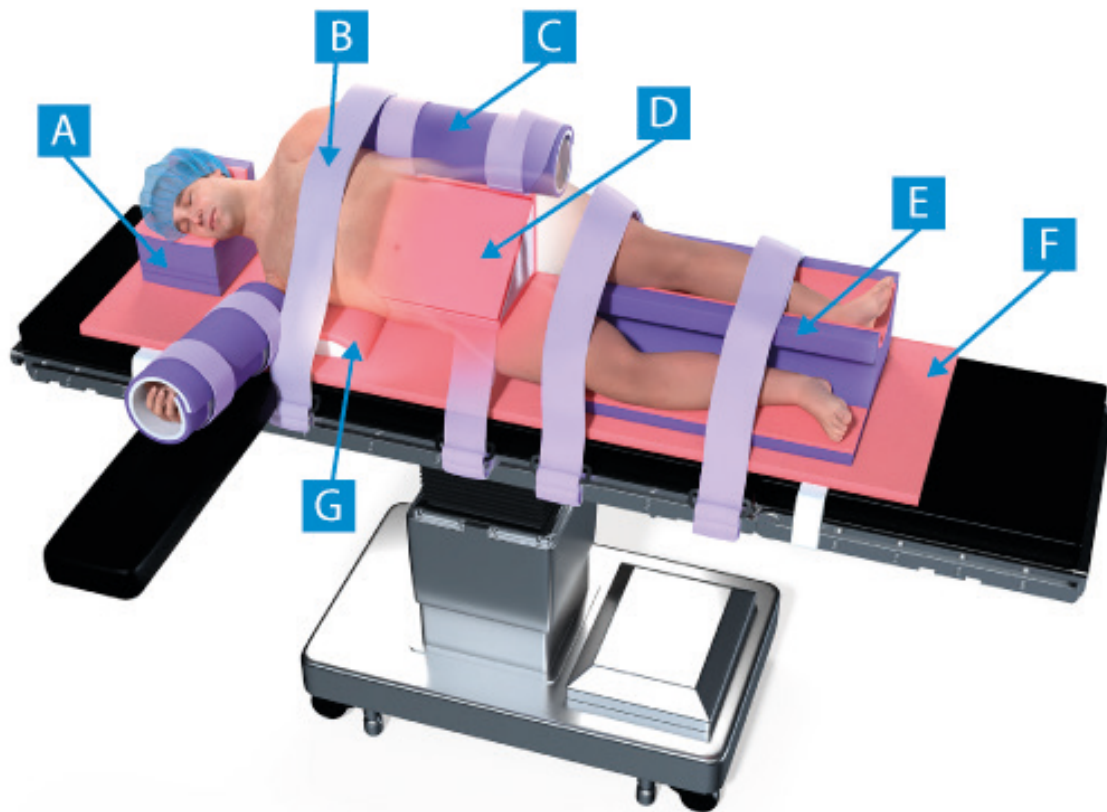


Savatta Pink Lat Pack innehåller:

- A** Justerbar positioneringskudde för sidoläge (1)
- B** Kroppsremmar (4)
- C** Armskydd med DermaProx-lager (2)
- D** Kilkudde Medium flervinklad (1)
- E** Savatta kilkudde för benpositionering (1)
- F** Pink Pad Extended (1)
- G** Stödbåge Standard (1)
- H** Draglakan (1)

Antal / förpackning: 1

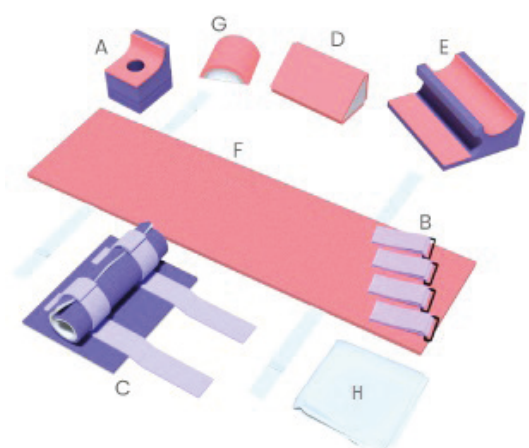


LPK10023 – Jackknife Pink Lat Pack

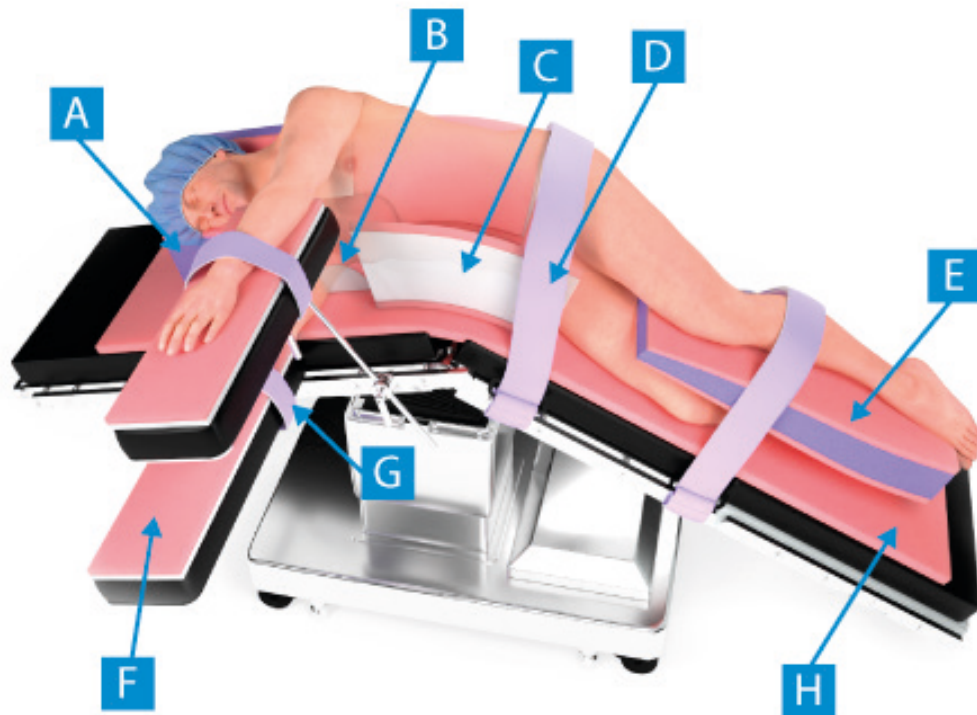


Jackknife Pink Lat Pack innehåller:

- A** Justerbar positioneringskudde för sidoläge (1)
- B** Stödbåge Standard (1)
- C** Kilkudde låg profil (2)
- D** Kroppsremmar (3)
- E** Avsmalnad kil för benpositionering (1)
- F** Armstödsdyna PinkProtect Large (2)
- G** Armrem för armbord (2)
- H** Pink Pad Extended (1)
- I** Draglakan (1)

Antal / förpackning: 1

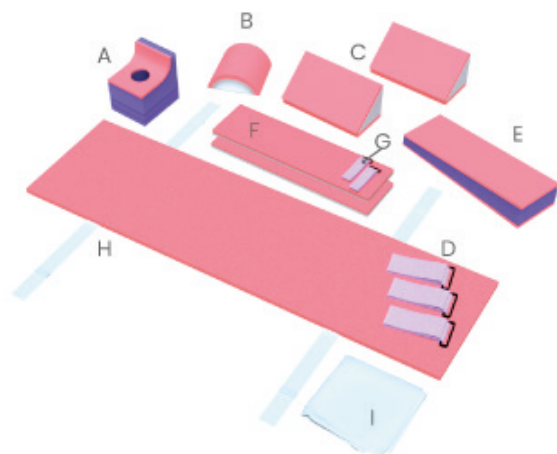


LPK10015 – Thoracic Pink Lat Pack

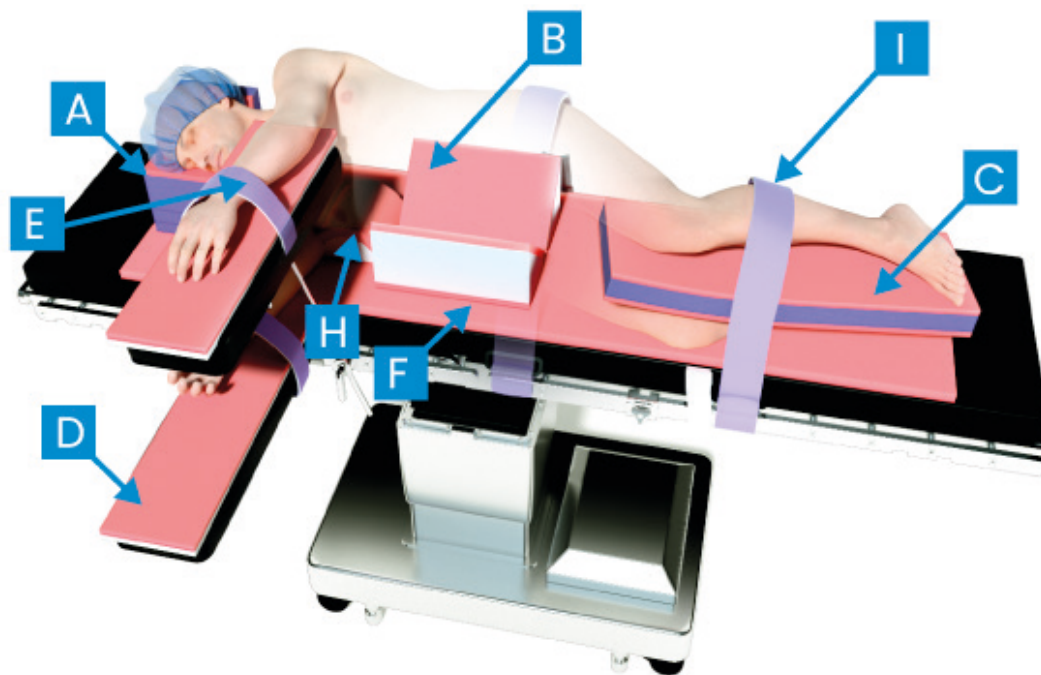

Thoracic Pink Lat Pack innehåller:

- A** Justerbar positioneringskudde för sidoläge (1)
- B** Kilkudde låg profil (2)
- C** Positioneringskudde för ben 7,5 cm (1)
- D** Armstödsdyna DermaProx™ (1 par)
- E** Armrem för armbord (2)
- F** Pink Pad Extended (1)
- G** Draglakan (1)
- H** Stödbåge PinkProtect för axel (1)
- I** Kroppsremmar (3)

Antal / förpackning: 3

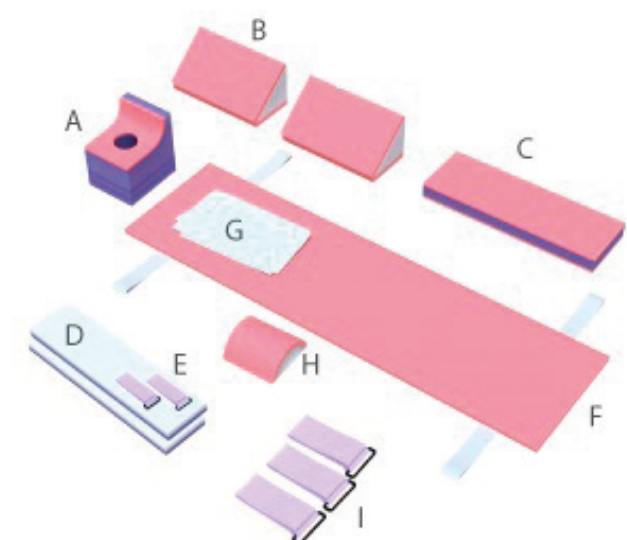

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss
018-430 09 80
info@steripolar.se

www.steripolar.se

10/2023