

Easywrap®

Enkel och säker kompression

- Lätt att applicera
- Säker kompression
- Behaglig att använda



when outcomes matter

Steripolar

Tel. 018-430 0980

| info@steripolar.se

| www.steripolar.se



Säker kompression som är lätt att använda

Easywrap kompressionstextil med kardborreband består av paneler som läggs omlott. Under den används en skyddande antimikrobiell understrumpa. Easywrap-textilen är snabb och enkel att applicera och tack vare kardborrebandet är den även enkel att justera.

Easywraps unika vävda material garanterar att den inte skrynklar eller rullar upp sig och säkerställer på så vis en jämn och säker kompression. Easywrap är utformat som ett kompressionsbandage med tunn profil så att det knappt syns under kläderna.




Patenterad knäledsdel med tre paneler

V-klippning av lår- och knä delen som är lätt att lägga och sitter bra runt knäområdet. Den ellipsformade klippningen och det mjuka undermaterialet gör att textilen är bekvämare att använda och förhindrar att textilen trycker mot knäets baksida.



1. APPLICERING

Lägg bandagets paneler med 50% överlappning och linda runt kroppsdelen.

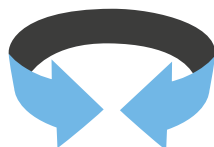

2. STRETCH

Stretcha lätt bandagets paneler runt kroppsdelen tills du känner att materialet har "låst sig".



3. PLACERING

Fäst kardborrebandet på panelen.



Den unika textilen garanterar rätt kompression, vilket i kombination med aktiva rörelser effektivt kan reducera svullnad. När aktivitetsgraden sjunker, bevarar Easywrap rätt kompression och fortsätter att minska svullnaden.



Använd kompression lokalt eller över ett större område

Kompressionsbandaget kan användas separat eller kombinerat. Med kompressionstextilier kan man behandla svullnad från fotvalvet upp över låret och med textilier för övre extremiteter, från handleden ända upp över överarmen. Armdelen förhindrar inte böjning av armen.

Den mekaniskt begränsade elasticiteten gör det enkelt att lägga bandaget korrekt spänt, och då kan du vara säker på att du har rätt kompression.



Easywrap fotdel SAND

PRODUKTNUMMER					MÅTT		
Storlek	LIGHT		STRONG		a ¹ omkrets	a fotsulans längd	
	Normal	Lång	Normal	Lång		Normal	Lång
XS	ELFR1	ELFL1	ESFR1*	ESFL1*	22-24	14,5-16,5	16,5-18,5
S	ELFR2	ELFL2	ESFR2*	ESFL2*	25-27	16-18	18-20
M	ELFR3	ELFL3	ESFR3*	ESFL3*	28-30	17,5-19,5	19,5-21,5
L	ELFR4	ELFL4	ESFR4*	ESFL4*	31-34	19-21	21-23
XL	ELFR5	ELFL5*	ESFR5*	ESFL5*	35-40	21-23	23-25

Easywrap fotdel SVART

PRODUKTNUMMER					MÅTT		
Storlek	LIGHT		STRONG		a ¹ omkrets	a fotsulans längd	
	Normal	Lång	Normal	Lång		Normal	Lång
XS	ELBFR1	ELBFL1*	ESBFR1*	ESBFL1*	22-24	14,5-16,5	16,5-18,5
S	ELBFR2	ELBFL2*	ESBFR2*	ESBFL2*	25-27	16-18	18-20
M	ELBFR3	ELBFL3*	ESBFR3*	ESBFL3*	28-30	17,5-19,5	19,5-21,5
L	ELBFR4*	ELBFL4*	ESBFR4*	ESBFL4*	31-34	19-21	21-23
XL	ELBFR5*	ELBFL5*	ESBFR5*	ESBFL5*	35-40	21-23	23-25

Easywrap underben SAND

PRODUKTNUMMER					MÅTT		
Storlek	LIGHT		STRONG		c omkrets	b omkrets	b-d längd mellan b och d
	Normal	Lång	Normal	Lång			Normal Lång
XS	ELLR1	ELLT1*	ESLR1*	ESLT1*	38-45	23-27	30-34 34-38
S	ELLR2	ELLT2	ESLR2*	ESLT2*	44-52	28-32	
M	ELLR3	ELLT3	ESLR3*	ESLT3*	50-60	33-38	
L	ELLR4	ELLT4*	ESLR4*	ESLT4*	55-65	39-44	
XL	ELLR5*	ELLT5*	ESLR5*	ESLT5*	60-70	45-52	

Easywrap underben SVART

PRODUKTNUMMER					MÅTT		
Storlek	LIGHT		STRONG		c omkrets	b omkrets	b-d längd mellan b och d
	Normal	Lång	Normal	Lång			Normal Lång
XS	ELBLR1	ELBLT1*	ESBLR1*	ESBLT1*	38-45	23-27	30-34 34-38
S	ELBLR2	ELBLT2*	ESBLR2*	ESBLT2*	44-52	28-32	
M	ELBLR3	ELBLT3*	ESBLR3*	ESBLT3*	50-60	33-38	
L	ELBLR4*	ELBLT4*	ESBLR4*	ESBLT4*	55-65	39-44	
XL	ELBLR5*	ELBLT5*	ESBLR5*	ESBLT5*	60-70	45-52	

*2 veckors leveranstid vid specialorder



Easywrap lår- och knädel SAND


PRODUKTNUMMER							MÅTT				
LIGHT			STRONG				g omkrets	e ¹ omkrets	e ¹ -g läng mellan e ¹ och g		
Storlek	Kort	Normal	Lång	Kort	Normal	Lång			Kort	Normal	Lång
XS	ELTS1	ELTR1*	ELTT1*	ESTS1*	ESTR1*	ESTT1*	60-70	47-52	16-20	20-24	25-30
S	ELTS2*	ELTR2*	ELTT2*	ESTS2*	ESTR2*	ESTT2*	65-75	53-59			
M	ELTS3*	ELTR3*	ELTT3	ESTS3*	ESTR3*	ESTT3*	70-80	60-66			
L	ELTS4*	ELTR4*	ELTT4*	ESTS4*	ESTR4*	ESTT4*	75-90	67-73			
XL	ELTS5*	ELTR5*	ELTT5*	ESTS5*	ESTR5*	ESTT5*	85-100	74-80			

Easywrap lår- och knädel SVART

PRODUKTNUMMER							MÅTT				
LIGHT			STRONG				g omkrets	e ¹ omkrets	e ¹ -g läng mellan e ¹ och g		
Storlek	Kort	Normal	Lång	Kort	Normal	Lång			Kort	Normal	Lång
XS	ELBTS1*	ELBTR1*	ELBTT1*	ESBTS1*	ESBTR1*	ESBTT1*	60-70	47-52	16-20	20-24	25-30
S	ELBTS2*	ELBTR2*	ELBTT2*	ESBTS2*	ESBTR2*	ESBTT2*	65-75	53-59			
M	ELBTS3*	ELBTR3*	ELBTT3*	ESBTS3*	ESBTR3*	ESBTT3*	70-80	60-66			
L	ELBTS4*	ELBTR4*	ELBTT4*	ESBTS4*	ESBTR4*	ESBTT4*	75-90	67-73			
XL	ELBTS5*	ELBTR5*	ELBTT5*	ESBTS5*	ESBTR5*	ESBTT5*	85-100	74-80			

Anvisning för omkretsen av de nedre extremiteterna

- g** Precis under ljumsken
e¹ Lårets nedre del
d 2 fingrars bredd under knävecket
c Vadens bredaste del
b Vristens omkrets
a¹ Fotens omkrets
a Fotsulans längdmått, från lilltån till hälen
b-d Avståndets mått på underbenets bakre del
e¹-g Avståndets mått på överbenets bakre del

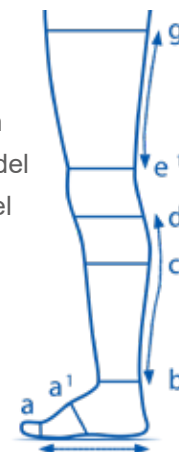


Easywrap arm SAND (endast Light)

	PRODUKTNUMMER						MÅTT					
	VÄNSTER			HÖGER			c omkrets	e omkrets	g omkrets	c-g längd mellan c och g		
Storlek	Kort	Normal	Lång	Kort	Normal	Lång				Kort	Normal	Lång
S	ELAS2L	ELAR2L*	ELAL2L*	ELAS2R	ELAR2R	ELAL2R*	14-18	20-27	22-31	40-44	44-48	48-52
M	ELAS3L	ELAR3L	ELAL3L*	ELAS3R	ELAR3R	ELAL3R	16-21	25-34	29-39			
L	ELAS4L	ELAR4L	ELAL4L*	ELAS4R	ELAR4R	ELAL4R	19-25	30-40	32-45			

Easywrap hand SAND (endast Light)

PRODUKTNUMMER			MÅTT	
Storlek	VÄNSTER	HÖGER	a omkrets	b omkrets
XS	ELH1L	ELH1R	<18	<19
S	ELH2L	ELH2R	18-20	19-21
M	ELH3L	ELH3R	20-22	21-23
L	ELH4L	ELH4R	>22	>24

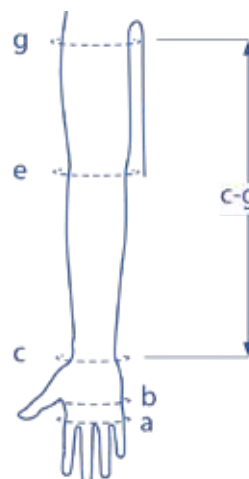

Anvisning för omkretsen av de övre extremiteterna

- g** Armhålsvecket
e Armbågsvecket
c Handledsvecket
b Hand, från tumvecket
a Hand, från fingerbasen
c-g Armens längdmått från handleden till armhålsvecket

*2 veckors leveranstid vid specialorder

Microfine kompressionsfingervante och tåstrumpa

Tunna och smidiga kompressionstextiler

- Kompression 20-36 mmHg
- Längden kan kortas av utan att textilen repar upp sig
- Modell finns för både vänster och höger fot
- Behaglig att använda, sömmarna på insidan
- Rengöring vid 30° grader
- Färgalternativ: sand och svart



Kan kombineras med Easywrap textilerna

Microfine fingervante

Storlek	PRODUKTNUMMER		MÅTT	
	Svart	Sand	a omkrets	b omkrets
XXS	228B0*	228S0*	14-16	15-17
XS	228B1*	228S1*	16-18	17-19
S	228B2*	228S2	18-20	19-21
M	228B3*	228S3	20-22	21-23
L	228B4*	228S4	22-24	24-26

Microfine tåstrumpa

Storlek	PRODUKTNUMMER		MÅTT
	Svart	Sand	a omkrets
XS	218B1*	218S1*	21-23
S	218B2*	218S2*	23-25
M	218B3	218S3*	25-27
L	218B4	218S4*	27-29
XL	218B5*	218S5*	29-31




Mätanvisning för Microfine tåstrumpa

a Trappdynans omkrets

Mätanvisning för Microfine fingervante

a Omkrets runt fingerbasen

b Omkrets runt tumbasen

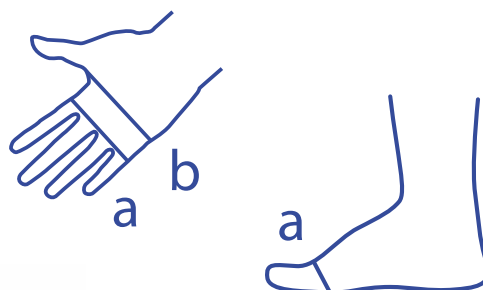

*2 veckors leveranstid vid specialorder

Easywrap Fusion Liner kompressionsstrumpor för fotområdet



Easywrap Fusion Liner kompressionsstrumpor är avsedda att användas i stället för Easywrap-fotdelen och i kombination med Easywrap-underbensdelen. Kompressionen i strumpan ligger endast i området kring foten och vristen. Finns i två olika kompressionsklasser: Light 20-30 mmHg och Strong 30-40 mmHg.


- Behaglig, tunn och diskret
- Vid knäleden minskar kompressionsnivån med hälften
- Strumpa med öppen tådel
- Elastisk underbensdel utan kompression
- Antimikrobiellt material

Easywrap Fusion liner SAND

Storlek	PRODUKTNUMMER		OMKRETS		
	LIGHT	STRONG	a ¹ fot	b vrist	c vadens bredaste del
XS	ELFD1	ESFD1	19-24	19-24	≤ 45
S	ELFD2	ESFD2	25-29	25-29	≤ 50
M	ELFD3	ESFD3	30-34	30-34	≤ 60
L	ELFD4	ESFD4	35-40	35-40	≤ 65
XL	ELFD5	ESFD5	41-46	41-46	≤ 70

Easywrap Fusion liner SVART

Storlek	PRODUKTNUMMER		OMKRETS		
	LIGHT	STRONG	a ¹ fot	b vrist	c vadens bredaste del
XS			19-24	19-24	≤ 45
S			25-29	25-29	≤ 50
M			30-34	30-34	≤ 60
L			35-40	35-40	≤ 65
XL			41-46	41-46	≤ 70

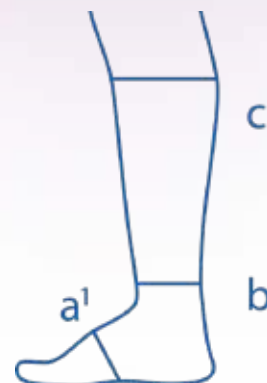

Anvisning för rätt storlek och modell

Nedan hittar du anvisningar om hur du i fyra steg enkelt mäter och väljer rätt storlek på dina kompressionsprodukter.

1.


Vilken kompressionsnivå behövs, Light eller Strong?

20-30 mmHG, dvs. Light-modellen eller 30-40 mmHG, dvs. Strong-modellen. Till exempel för en patient med bensår väljs i allmänhet Light-modellen.

2.

Vilka är patientens mått

Utför mätningen enligt anvisningarna och se motsvarande rad i tabellen

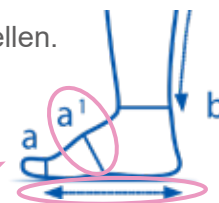

Storlek	PRODUKTNUMMER				MÅTT		
	LIGHT		STRONG		a ¹ omkrets	a fotens längd	
	Normal	Lång	Normal	Lång		Normal	Lång
XS	ELFR1	ELFL1	ESFR1*	ESFL1*	22-24	14,5-16,5	16,5-18,5
S	ELFR2	ELFL2	ESFR2*	ESFL2*	25-27	16-18	18-20
M	ELFR3	ELFL3	ESFR3*	ESFL3*	28-30	17,5-19,5	19,5-21,5
L	ELFR4	ELFL4	ESFR4*	ESFL4*	31-34	19-21	21-23
XL	ELFR5	ELFL5*	ESFR5*	ESFL5*	35-40	21-23	23-25

3.

Välj modell: kort, normal eller lång

Den korta modellen finns endast för lår-knäled och arm

4.

Välj produktnummer som motsvarar kompression, mått och modell

I detta fall när Light-kompression väljs, ger normallång modell och tagna mått ett resultat som motsvarar storlek M.

OBS! Om du inte hittar rätt storlek i tabellen, välj en modell av måttbeställd storlek. Kontakta representanten i ditt område eller ta kontakt med vår kundtjänst om du har fler frågor.



when outcomes matter

Steripolar

Tel. 018-430 0980

info@steripolar.se

www.steripolar.se